

ACCE. 16015

UDI-DI 872026126SPECIALN5

Gebruiksaanwijzing

Transporter



Nijland Cycling, Gebruiksaanwijzing 2025

Branding & Design

Studio Debuut

Realisatie

Raoul Alferink

Fotografie

Melvin Winkeler

Redactie

Nijland Cycling

Risicoklasse: 1

Uitgifte datum: 1-1-2025

Versie: 1

Taal: Nederlands

Transporter

Model	EAN:
Transporter	8720261260600
Transporter E	8720261260617

© 2025 Nijland Cycling. Alle rechten voorbehouden. Alle informatie en prijzen in deze brochure zijn onder voorbehoud van eventuele onjuistheden of drukfouten. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming.



Inhoudsopgave

04

Informatie

Inleiding	4
Contactgegevens	5
Conformiteit	5
Eerste gebruik	5
Gebruik	5

06

Beheer

Tips	6
Onderhoud	6
Veiligheid	7
Voorkom diefstal	8

08

Componenten

Verlichting	8
Banden	9
Remmen	9
Zadel	10
Stuur	10
Versnellingen	11
Oprijplaten	11
Slot	11
Bagagedrager	12
Milieu	12
Transport en opslag	12

13

Documentatie

Dimensies	13
Specificaties	14
Garantie	15
Garantiebewijs	15
Formulier service, onderhoud en modificaties	16
Onderhoudshistorie	17
Notities	18



Informatie

Inleiding

Deze handleiding geeft u belangrijke informatie over het gebruik van de Transporter. We raden u aan om deze goed door te lezen voordat u de fiets voor het eerst gebruikt. Zo leert u de belangrijkste onderdelen kennen en ontdekt u hoe u veilig en comfortabel kunt fietsen.

Het is belangrijk om de instructies in deze handleiding te volgen. Dit zorgt niet alleen voor uw eigen veiligheid, maar ook voor die van anderen. Bovendien helpt het om uw fiets in goede staat te houden en er optimaal van te genieten.

Bewaar deze handleiding op een handige plek, zodat u deze altijd kunt raadplegen. Voor de nieuwste versie kunt u contact opnemen met Nijland Cycling. We zorgen ervoor dat u altijd de meest actuele informatie tot uw beschikking heeft.

We hopen dat u veel plezier zult beleven aan de Transporter. Geniet van elke rit, wetende dat u goed voorbereid op pad gaat.

Met vriendelijke groet,

Team Nijland Cycling



Contactgegevens

 Nijland Cycling B.V.
Telgenweg 12
8111 CM Heeten

 +31(0)572 382 222

 info@nijland.com

 www.nijland.com

Conformiteit

Nijland Cycling verklaart als fabrikant dat de Transporter en Transporter E worden geproduceerd conform de NEN-EN 15194:2017 Fietsen – Elektrisch ondersteunende fietsen. De conformiteitsverklaring is beschikbaar bij de fabrikant.

Eerste gebruik

Uw dealer dient onderstaande punten met u door te nemen:

1. Verzeker u ervan dat de fiets juist is afgesteld voor uw lichaamslengte en gewicht.
2. Oefen in een rustige omgeving om vertrouwd te raken met de fiets en een goede controle te ontwikkelen.
3. Oefen het gebruik van de handremmen op verschillende soorten ondergrond.
4. Probeer op verschillende snelheden te fietsen en leer hoe u het evenwicht moet bewaren.
5. Neem de tijd om te wennen aan de fiets en verhoog geleidelijk de afstand van de rit.
6. Controleer regelmatig de fiets en zorg ervoor dat alles op de juiste manier werkt en is afgesteld.

Paraaf Dealer: _____ Datum: _____

Gebruik

De Transporter rolstoelfiets is ontworpen voor het veilig vervoeren van een persoon in een rolstoel, waarbij de bestuurder achterop de fiets zit en de rolstoelgebruiker voorop. De fiets is geschikt voor personen met verminderde mobiliteit, stabiliteit, coördinatie of andere beperkingen in hun natuurlijke bewegingsmogelijkheden. Tijdens het gebruik is toezicht en begeleiding altijd vereist. De bestuurder moet zelfstandig mobiel zijn en op een verantwoorde manier aan het verkeer kunnen deelnemen, met inachtneming van de geldende verkeersregels. Het is essentieel dat de instructies in deze handleiding nauwkeurig worden opgevolgd. Gebruik van de Transporter op een andere manier dan hierin beschreven, valt buiten de verantwoordelijkheid van Nijland Cycling.



Beheer

Tips

- Gebruik voor het schoonmaken nooit een hogedrukreiniger, het water kan vet wegnemen en draaiende onderdelen eerder laten slijten. Gebruik hiervoor een schone doek.
- Smeer de remmen nooit in met smeermiddelen, dit kan de werking verminderen.
- Als u of uw dealer het stuur/zadel in de hoogte wilt verstellen, moet er rekening mee gehouden worden dat de veiligheidsmarkering niet te zien mag zijn.
- Zorg ervoor dat u goed zichtbaar bent voor andere weggebruikers terwijl u op de fiets rijdt.
- Wij raden u aan een fietsverzekering af te sluiten.

Onderhoud

Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van je fiets. We raden aan om reparaties en service door je dealer te laten uitvoeren. Om langdurig plezier van je fiets te hebben, is het erg belangrijk dat je regelmatig de volgende punten controleert:

Maandelijks:

Controleer iedere maand uw bandenspanning, werkt de verlichting, werken de remmen op de juiste manier, zitten de pedalen en de cranks stevig vast, zit er geen speling op het balhoofdstel, is de spaakspanning juist, zit er geen slinger in het wiel en zit de zadel- en stuurpen goed vast.

Halfjaarlijks:

Vet de zadelpen en stuurpen in, controleer of de wielassen goed vastzitten en of alle bevestigingsbouten stevig zijn aangedraaid. Controleer daarnaast op speling op het balhoofdstel, draai de schroeven van het zadel en stuur na, en smeer de pedaalas in met vet.

Jaarlijks:

Laat uw fiets minimaal één keer per jaar door uw dealer controleren. De volgende onderdelen dienen hierbij nagekeken te worden: aandrijving, frame, voorvork, wielnaven, verlichting, spaakspanning, remmen en lagers. Controleer bovendien de velgen op vervorming, scheuren en roestvorming.

Achter in deze handleiding vindt u de onderhoudshistorie, met een overzicht van alle uitgevoerde werkzaamheden.



Let op: Onderdelen die tijdens het onderhoud worden vervangen, moeten van hetzelfde merk en type zijn als die door Nijland Cycling worden gebruikt. Het is niet toegestaan andere onderdelen te monteren.

Veiligheid

Veiligheid staat voorop. Neem daarom onderstaande punten in acht om een veilige en plezierige rit te waarborgen:

- De fiets is persoonsgebonden.
- Zorg dat de maatstelling van de fiets is afgesteld op u als gebruiker.
- Zorg ervoor dat elke keer voordat de fiets wordt gebruikt, deze zich in goede conditie verkeert. Controleer vóór elke rit de correcte werking van de remmen, de correcte werking van de verlichting en zorg ervoor dat er voldoende lucht in de banden aanwezig is.
- Controleer met regelmaat of de wielen, het stuur en het zadel goed vast zitten en ook of alle schroefverbindingen goed aangedraaid zijn.
- Gebruik de fiets op een zo solide en vlakke ondergrond mogelijk. Hou rekening met kuilen en oneffenheden, pas hierop uw snelheid aan.
- Pas op dat wijde broeken, wapperende kledingstukken en losse veters niet vast komen te zitten in de ketting, de spaken of de pedalen.
- Gebruik voor het reinigen geen hogedruk- of stoomreiniger.
- Gebruik de parkeerrem als u de fiets parkeert (en achterlaat). Blokkeer met de parkeerrem ook de fiets tegen weggrijden tijdens op- en afstappen.
- Zet de driewieler te allen tijde op slot als u de fiets onbeheerd achterlaat.
- Let op dat er zich bij afdalingen geen gevaarlijke snelheid ontwikkelt. Rem tijdig en pas uw snelheid aan naar de omstandigheden.
- Houd er rekening mee dat de remafstand bij slecht weer beduidend langer is op nat wegdek.
- Tijdens een zwangerschap is extra voorzichtigheid vereist in verband met een verhoogde kans op letsel.
- Zet de fiets niet in direct zonlicht: de temperatuur van sommige onderdelen kan risicovol zijn. Bij het in contact komen met de huid kan dit mogelijk overgevoeligheid van de huid als gevolg hebben.
- Bij de elektrisch ondersteunde Transporter: Neem de tijd om aan de functies van de ondersteuning te wennen. Let altijd goed op als u de ondersteuning inschakelt. Oefen met het versnellen van de elektromotor.
- Laat na een ongeval of incident de fiets controleren, ook als er geen zichtbare schade is.
- Neem altijd een mobiele telefoon mee en zorg dat u het telefoonnummer van uw dealer in uw contacten heeft staan.
- Zorg ervoor dat u altijd goed voorbereid op pad gaat.
- Let op met het nemen van haakse/scherpe bochten en drempels, pas hierop uw snelheid aan.

Extra aandacht is vereist indien een kind de fiets gebruikt.

- Laat een kind nooit alleen met de fiets zonder toezicht.
- Laat een kind altijd een fietshelm dragen. Let op dat de helm correct past.
- Laat een kind opvallende reflecterende kleding dragen, zodat hij/zij goed wordt gezien door andere weggebruikers.
- Waarschuw het kind dat het tijdig moet remmen bij afdalingen en het inrijden van tunnels, zodat hij/zij geen gevaarlijke snelheid ontwikkelt.
- Het is aan te bevelen om aan de fiets een vlaggetje te monteren, die boven het kind uitsteekt.

Voorkom diefstal

- Zet uw fiets altijd op slot.
- Gebruikt u een kabelslot, dan kunt u uw fiets verankeren aan een hek of paal. Als de kabel lang genoeg is, haal hem dan door het frame en het voorwiel.
- Elke fiets heeft een uniek framenummer, deze is te vinden op de frame sticker welke zich op de zadelbuis bevindt.

Framenummer: _____



Componenten

Verlichting

De Transporter is voorzien van verlichting op batterijen. Met een eenvoudige aan- en uitknop is de verlichting gemakkelijk te bedienen, waardoor gebruikers snel en moeiteloos extra zichtbaarheid kunnen creëren tijdens hun rit. Deze batterij-aangedreven verlichting biedt een praktische oplossing voor het verbeteren van de zichtbaarheid en het bevorderen van de veiligheid tijdens het gebruik van de Tandem.



Banden

Als uw banden niet op de juiste spanning zijn dan zullen ze sneller slijten. Daarom raden wij u aan regelmatig te controleren of uw banden op de juiste spanning zijn. De banden zijn op de juiste spanning, wanneer u ze nog net iets met uw duim in kunt drukken. U rijdt op harde banden veel plezieriger, want u hoeft minder kracht op de pedalen te zetten. Een juiste bandenspanning vereenvoudigt tevens het sturen. De aanbevolen hoeveelheid bar (bandenspanning) kunt u vinden op de banden van uw fiets of bij het hoofdstuk **Dimensies** achterin deze gebruiksaanwijzing.

Remmen

De remmen behoren tot de belangrijkste onderdelen van uw fiets. Gebruik zoveel mogelijk beide remmen om zo gedoseerd mogelijk vaart te kunnen minderen. Controleer altijd voordat u gaat fietsen of de remmen goed werken. Als u merkt dat u de remhevels bijna tot aan het handvat moet trekken voordat u remt, dan moeten de remmen opnieuw afgesteld worden. De remhendel van de voorrem is links gemonteerd en de remhendel van de achterrem is rechts gemonteerd. De Transporter is standaard voorzien van hydraulische remmen. Met hydraulische remmen geniet u van krachtige en responsieve remkracht, precieze dosering en weinig onderhoud. Het verhoogt uw vertrouwen en zorgt voor een betere fietservaring.

Parkeerrem:

De Transporter beschikt over een parkeerrem in plaats van een fietsstandaard. In situaties waar de fiets niet zou blijven staan kunt u deze gebruiken. Zodra u de rem indrukt (A) en de schuif naar binnen drukt (B), staat de fiets op de parkeerrem. (Figuur 1)



 Door de hendel en schuif te bewegen kunt u de parkeerrem (de-)activeren.

Freewheelnaaf:

Met een freewheelnaaf kunt u niet remmen via de pedalen, dit kan alleen met de remhevels aan het stuur. U heeft zowel links als rechts een remhendel.

Zadel

Wanneer u op het zadel zit, is deze op de juiste hoogte afgesteld als u uw schoen vlak op de grond kan zetten.

De hoek van het zadel kan worden versteld door de bout los te draaien met steeksleutel (Figuur 2). Na het verstellen van het zadel moet de klem goed vastgezet worden.

Let op: De veiligheidsmarkering op de zadelpen mag niet zichtbaar zijn als het zadel in de zadelbuis zit (Figuur 3).




2 Zadel verstellen



3 Hoogtemarkering

Stuur

Het stuur kan in hoogte versteld worden door middel van het losdraaien van de dopmoeren (A). De hoek van het stuur kan versteld worden door het losdraaien van de dopmoeren (B) (Figuur 4).

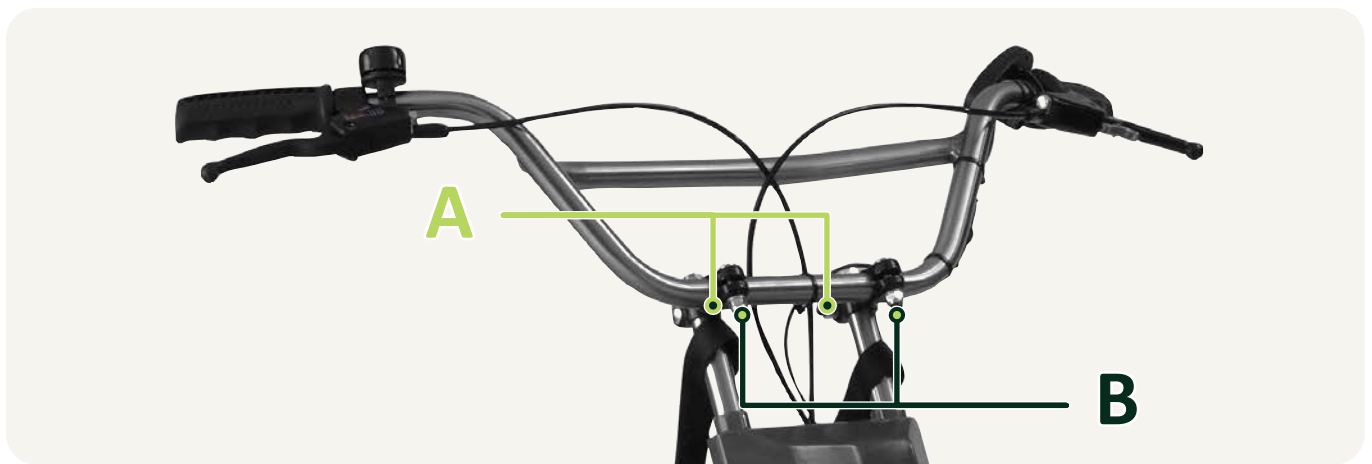

4 Deze afbeelding geeft weer hoe het stuur versteld kan worden.



Versnellingen

Uw fiets kan uitgevoerd zijn met versnellingen. Indien uw fiets met versnellingen is uitgevoerd, bevindt er zich op het stuur een gripshift (Figuur 5).

Wanneer u richting de + draait, kunt u zwaarder trappen. Wanneer u richting de - draait, kunt u minder zwaar trappen.



5 Gripshift

Oprijplaten

Maak de veiligheidshaken los en u kunt de platen aan de hendels (A) naar buiten trekken. Zodra deze zijn uitgeschoven kunt u het voorste gedeelte 180° draaien (Figuur 6), dit zorgt ervoor dat de oprijplaat volledig uitgeklappt is. Nu is het veilig om de rolstoel erop te rijden en te positioneren. Als u de oprijplaten weer naar binnen wilt schuiven draai het voorste gedeelte van de plaat dan 180° terug en schuif de plaat weer terug in de houder. Vergeet niet om de platen weer vast te zetten met de veiligheidshaken.

Let op: Zorg er te alle tijden voor dat de rolstoel goed is verankerd aan de fiets en geen kant op kan.



6 Deze afbeeldingen geeft weer hoe u de oprijplaten moet gebruiken.

Slot

Uw fiets is voorzien van een veiligheidsringslot. Het veiligheidsslot is op de volgende manier te bedienen:

1. Draai de sleutel in het slot rechtsom.
2. Duw de schuifhendel naar beneden, zodat het slot het voorwiel vergrendeld.
3. Draai de sleutel in het slot linksom en verwijder de sleutel uit het slot.

U kunt het wiel ontgrendelen door de sleutel in het slot te steken en rechtsom te draaien.

Bagagedrager

De Transporter is standaard voorzien van een bagagedrager om uw spullen makkelijk kan vervoeren. Zorg er wel voor dat spullen stabiel staan en vastgezet zijn met bijvoorbeeld een snelbinder of spin.

Milieu

Een defecte, lekkende, gevallen of vervormde accu dient direct te worden vervangen. De oude accu dient te worden ingeleverd bij de dealer of de milieustraat van de gemeente.

Transport en opslag

- Mocht u de Transporter transporteren per voertuig, zorg dat dit veilig gebeurt en maak daarnaast altijd gebruik van de parkeerrem.
- Het is verboden om iemand op de Transporter te vervoeren als deze met transport gaat.
- Wij raden het aan om de Transporter te allen tijde droog te bewaren.
- Wanneer de fiets voor langere tijd wordt opgeslagen, dient u vóór gebruik de bandenspanning te controleren. De bandenspanning moet overeenkomen met de door de fabrikant genoemde waarden.
- Het is van belang dat u de gebruiksaanwijzing van uw accu leest, met name als uw driewieler voor een langere tijd stil staat. Dit in verband met ontladingsvoltages.
- Voordat u de driewieler voor langere tijd opslaat raden wij het aan om deze te reinigen.





Details

Dimensies



Transporter

Totale lengte:	212 cm
Totale breedte:	109 cm
Gewicht:	75 kg
Geschikte binnenbeenlengte:	80 – 100 cm
Crank lengte:	17 cm
Maximale belasting:	max. 250 kg
Instaphoogte:	30 cm
Max. rolstoelbreedte:	67 cm
Max. toelaatbaar gewicht bagagedrager:	25 kg
Bandenmaat voor:	20 x 1.75 inch
Bandenmaat achter:	26 x 2.00 inch
Bandenspanning:	Voor: 3.5 – 5 bar / Achter: 2 – 5 bar

Specificaties

Frame:	Stalen frame met 2 laags poedercoat lak
Kleur:	Titan grey of RAL wenskleur
Elektrisch systeem:	Crystalyte achterwiel motor
Accu:	Uitneembare 36V, 10,4 Ah accu
Verlichting:	Op batterij
Aandrijving:	7 versnelling derailleur
Kettingkast:	Pistool kettingkast
Stuur:	RVS stuur
Zadel:	In zadelhoek en zithoogte verstelbaar
Wielen:	Geslepen velgen met RVS spaken
Spatborden:	Zwart gecoat aluminium
Banden:	Schwalbe Marathon Plus
Pedalen:	Kunststof antislip pedalen
Cranks:	Zilveren aluminium cranks
Remmen voor:	HS11 Hydraulische velgremmen
Remmen achter:	HS11 Hydraulische velgrem
Opties:	Verschillende opties mogelijk, informeer bij uw dealer



Garantie

- Nijland Cycling geeft 5 jaar garantie op frame en voorvork.
- Er wordt 2 jaar garantie gegeven op overige onderdelen zover deze niet aan de normale slijtage onderhevig zijn.
- Alleen de eerste eigenaar heeft recht op garantie; de garantie is niet overdraagbaar

Garantie wordt niet verleend indien:

- De fiets oneigenlijk of onzorgvuldig is gebruikt of is beschadigd door een ongeval.
- De onderdelen aan gewone slijtage onderhevig zijn; banden, kabels enz.
- De fiets niet is onderhouden zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.
- Reparaties ondeskundig zijn uitgevoerd.
- De constructie van de fiets gewijzigd is.

Overige bepalingen

- U kunt alleen aanspraak maken op garantie indien u het garantiebewijs samen met de aankoopbon kunt aantonen.

Garantiebewijs

Dit garantiebewijs dient u zorgvuldig in te vullen en samen met uw aankoopbewijs te bewaren tot 5 jaar na aankoopdatum.

- **Fietsgegevens:**

Merk en type: _____

Framenummer: _____

Aankoopdatum: _____

- **Eigen gegevens:**

Naam: _____

Adres: _____

Postcode en woonplaats: _____

- **Dealer gegevens:**

Naam: _____

Adres: _____

Postcode en woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____

Formulier service, onderhouden modificaties

U kunt alleen aanspraak maken op garantie indien uw fiets de servicebeurten heeft gehad volgens onderstaand schema.

Servicebeurt:	Uitgevoerd op:	Paraaf dealer:
Na eerste 200 km of 2 maanden		
Servicebeurt 1 jaar na aflevering		
Servicebeurt 2 jaar na aflevering		
Servicebeurt 3 jaar na aflevering		
Servicebeurt 4 jaar na aflevering		
Servicebeurt 5 jaar na aflevering		

Wij adviseren u om ook na 5 jaar uw fiets een jaarlijkse servicebeurt te geven. Het nalaten hiervan heeft geen gevolgen voor de garantietermijn omdat deze na 5 jaar is verstreken.

Modificatie aan de fiets

Gewijzigd:	Uitgevoerd op:	Uitgevoerd door:

Let op! Alleen Nijland Cycling mag een modificatie op deze fiets uitvoeren.



Onderhoudshistorie

Onderrhoud:

Notities

[illegible]



